

# Lubristil Synfo

**Soluție oftalmică sterilă echilibrată conținând hialuronat de sodiu, gumă xantan și osmoprotectori**

## Indicații

**LUBRISTIL SYNFO**, datorită componentelor sale, protejează, hidratează și lubrifică suprafața oculară. Este indicat în toate cazurile de disconfort ocular și de uscăciune oculară cauzate, de exemplu, de:

- Sindromul de ochi uscat;
- Chirurgia oculară;
- Reacții alergice;
- Utilizarea cronică de medicamente cu aplicare topică (precum agenți hipotonizanți oculari, picături oftalmice cu conservanți etc.);
- Utilizarea medicamentelor cu administrare sistemică (precum terapia de substituție hormonală, antihipertensive, antidepressive, antihistaminice etc.);
- Menopauză;
- Îmbătrânire;
- Stres legat de factorii de mediu (poluare, aer condiționat, fum, vânt etc.);
- Utilizarea îndelungată a dispozitivelor electronice (computer, tabletă, telefon);
- Utilizarea lentilelor de contact.

Produsul nu conține conservanți, putând fi astfel folosit și de către purtătorii de lentile de contact.

## Compoziție

Hialuronat de sodiu, gumă xantan, glicină, betaină, tampon Tris-HCl, clorură de sodiu, apă purificată. Fără conservanți. Fără fosfați.

## Forma de prezentare

1 flacon de 10 ml.

1 prospect.

## Caracteristici și mecanism de acțiune

**LUBRISTIL SYNFO** conține doi polimeri naturali, hialuronatul de sodiu și guma xantan, cu proprietăți lubrifiante, hidratante și mucomimetice. Efectele reepitelizante și antioxidante ale ambelor componente sunt augmentate de acțiunea lor sinergică.

**LUBRISTIL SYNFO** conține, de asemenea, glicină și betaină, substanțe cu acțiune osmoprotectoare care favorizează menținerea homeostaziei celulare care, de obicei, este alterată în cazurile de uscăciune oculară. Glicina și betaina joacă un rol în faza de remodelare a epitelului ocular din timpul proceselor de vindecare, acționând ca osmoprotectori asupra celulelor expuse stresului hiperosmotic.

Datorită combinației de hialuronat de sodiu, gumă xantan și osmoprotectori, **LUBRISTIL SYNFO** hidratează, lubrifică și repară suprafața oculară, contribuind la refacerea homeostaziei și protejând-o împotriva leziunilor oxidative.

**LUBRISTIL SYNFO** garantează, de asemenea, o senzație îndelungată de calmare și confort maxim.

## Doze și mod de administrare

Instilați o picătură de **LUBRISTIL SYNFO** în sacul conjunctival de patru ori pe zi sau la nevoie.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de prima aplicare scoateți sigiliul și capacul de protecție;

- Instilați câte o picătură în fiecare ochi prin strângerea flaconului;
- Scuturați flaconul în jos pentru a elimina resturile de soluție de pe picurător;
- Închideți flaconul imediat după utilizare.

Produsul trebuie utilizat în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului.

#### **Contraindicații:**

Hipersensibilitate la unul dintre componente.

#### **Precauții și avertizări**



Nu utilizați **LUBRISTIL SYNFO** dacă flaconul este deschis sau deteriorat.

În timpul aplicării asigurați-vă că vârful picurător nu intră în contact cu ochii, cu pleoapele sau cu alte suprafețe.

Păstrați sub 25 °C.

Nu utilizați **LUBRISTIL SYNFO** după data de expirare.

Nu aruncați produsul în mediul înconjurător după utilizare.

Administrarea **LUBRISTIL SYNFO** la copii sau la persoane cu abilități limitate trebuie supravegheată de un adult responsabil.

#### **Interacțiuni cu alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular**

Nu se cunosc interacțiunile produsului cu administrarea altor medicamente pentru uz ocular; ca urmare, este recomandată evitarea utilizării altor produse medicamentoase sau dispozitive medicale pentru uz ocular mai repede de 10 minute de la administrarea **LUBRISTIL SYNFO**.

Nu este necesară scoaterea lentilelor de contact înainte de administrarea **LUBRISTIL SYNFO** întrucât produsul nu alterează caracteristicile fizice, inclusiv transparența, ale celor mai obișnuite lentile de contact moi, semirigide, sau rigide.

#### **Efecte nedorite**

Utilizarea produsului poate cauza, ocazional, o ușoară arsură sau iritație.

În cazul apariției uneia dintre aceste reacții întrerupeți utilizarea produsului.

#### **DOAR PENTRU UZ OCULAR TOPIC**

#### **NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA ȘI LA VEDEREA COPILOR**

#### **Producător**

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36

95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALY

Distribuit de: S.C. OFTAFARMA ROMANIA SRL, Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, et.2, ap. 5,  
Sector 5, București. Tel. 021.314.28.95.

**LUBRISTIL SYNFO** este un dispozitiv medical steril.

CE 0123

Ultima revizie a textului: iunie 2020